

ЮниЛайн

биопротез аортального клапана сердца

**Рекомендации по использованию
имплантационной системы**



NeoCor



1. Откройте контейнер с биопротезом.



2. Визуально оцените цвет жидкости и целостность конструкции. Жидкость должна быть прозрачной, от желтоватого до светло-соломенного цвета, без взвеси и посторонних частиц.



3. Присоедините ручку к держателю протеза вращательным движением по часовой стрелке.




4. Извлеките защитный каркас из контейнера.



5. Окончательно извлеките биопротез из защитного контейнера. Проверьте целостность нитей, соединяющих стойки и биопротез.



6. Промойте биопротез в стерильном физиологическом растворе в течение 15 мин с трехкратной сменой раствора через каждые 5 мин.

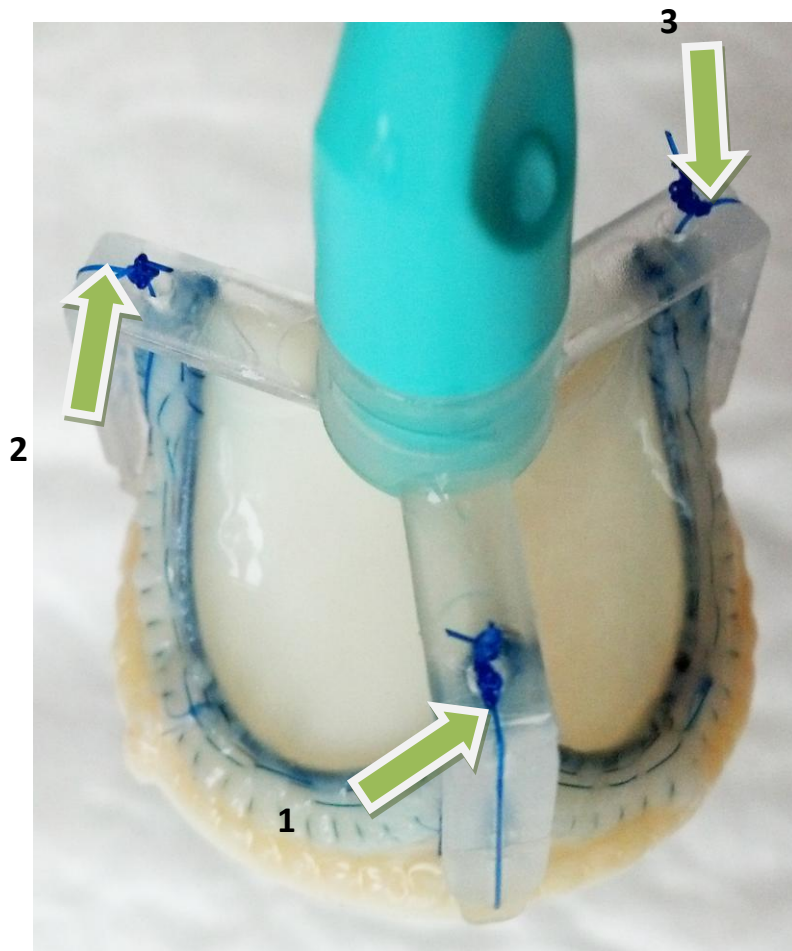

7. Биопротез имплантируют в супрааннулярную позицию П-образными швами. Перед погружением клапана убедитесь в том, что лигатуры швов, наложенных на фиброзное кольцо и манжету, не зацепились за элементы каркаса, особенно в зоне стоек. После установки биопротеза в фиброзное кольцо разрежьте каждую из нитей держателя в местах 1, 2 и 3. Потяните держатель, вместе с держателем извлекутся нити, фиксировавшие имплантационную систему на клапане.

